



ClearSounds®
Hear how good life can be

IL95

V508



ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

Importantes Consignes De Sécurité

À l'aide de votre amplificateur portatif de téléphone, suivre toujours les mesures de sécurité de base pour ramener le risque du feu, de choc électrique et de dommages aux personnes ou à la propriété, y compris ce qui suit :


1. Lire et comprendre tous les instructions, avertissements et inscriptions de produit.
2. Ne pas employer ce produit près ou dans de l'eau ou quand vous êtes humide.
3. Ne pas ouvrir cette valise de produit comme vous pouvez s'exposer aux tensions dangereuses ou à d'autres risques. L'ouverture de la valise de produit vide automatiquement la garantie.

SAUVER CES INSTRUCTIONS


Alimentation électrique

Votre IL95 vient avec un adaptateur à C.A., il est recommandé que vous utilisez une batterie 9V comme support. Dans le cas d'une coupure électrique, votre IL95 commutera automatiquement à la puissance de batterie.

Remarque: Insérer la batterie en la cassant dans les connecteurs à l'intérieur d'observer de compartiment de batterie +/- polarité sur l'attache instantanée de bouton. Important : Avant de remplacer la batterie, veiller à démonter l'IL95 du téléphone et du courant alternatif.

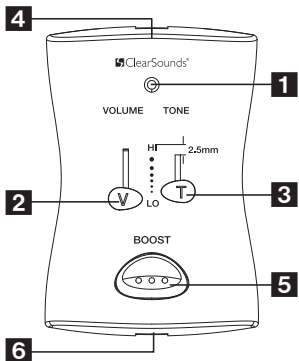

1. Le voyant de signalisation de puissance
2. Volume
- 3 Tonalité
- 4 Téléphone Jack (base)
5. Bouton de poussée

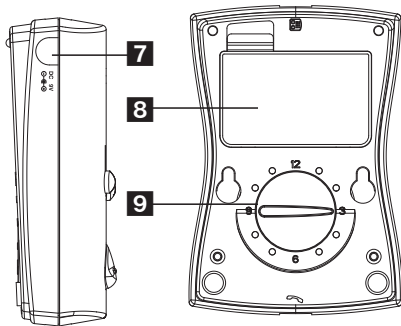

- 6 Combiné Jack
- 7 Adaptateur Jack de courant alternatif
8. Compartiment de batterie
9. Commutateur de compatibilité de 12 positions

INSTALLATION

1. Débrancher la corde de combiné de votre base de téléphone. Insérer cette corde dans le " marqué par cric ; HANDSET" ;
2. Brancher un côté de la corde de téléphone courte (incluse) au " marqué par cric ; BASE" ;. Brancher l'autre extrémité à la base de téléphone.
3. Placer le commutateur de compatibilité au " ; 4" ; arrangement. Cet arrangement fournissent la compatibilité pour la plupart des téléphones.
4. Attacher l'adaptateur de courant alternatif à l'IL95 (situé du côté supérieur de main gauche de l'unité) et brancher l'autre extrémité à une sortie électrique de fonctionnement.
5. Prendre le combiné. Si vous entendez une tonalité d'invitation à numéroté, votre amplificateur IL95 est installé correctement.
6. Être sûr d'enregistrer votre produit en ligne chez www.clearsounds.com

Si vous n'entendez pas qu'une tonalité d'invitation à numéroté ou la personne que vous appelez ne peut pas vous entendre, consulter la section de compatibilité de téléphone.

OPÉRATION

Vous pouvez ajuster le niveau de volume en employant la glissière de commande de volume. La poussée de la glissière augmente vers le haut le volume.

Vous pouvez ajuster la tonalité en employant la glissière de commande de tonalité. Ajuster la commande de tonalité jusqu'à ce que vous trouviez une position qui fournit le bruit le plus clair.

Si vous avez besoin de l'amplification additionnelle à un point quelconque dans votre conversation, presser simplement le & ; tenir le bouton de poussée. Quand le bouton de poussée est appuyé sur, le microphone dans le combiné est amorti. Libérer le bouton de poussée quand vous voulez parler.

Le voyant de signalisation de puissance avance chaque fois que vous prenez le combiné pour indiquer que le niveau de puissance est correct. Si le voyant de signalisation n'avance pas, vérifier vos raccordements d'adaptateur ou remplacer la batterie.

Important : Avant de remplacer la batterie, veiller à démonter l'IL95 du téléphone et de l'adaptateur à C.A.

COMPATIBILITÉ DE TÉLÉPHONE

Puisque non tous les combinés de téléphone sont câblés d'une manière standard, nous avons fourni un commutateur de compatibilité de 12 positions :

1. Presser le & ; tenir le " ; sur-hook" ; brancher votre téléphone ou placer le combiné dans le berceau.

2. Ajuster le commutateur en le tournant un " ; click" ; au prochain arrangement.
3. Libérer le " ; sur-hook" ; le commutateur ou prennent le combiné et détectent à l'oreille une tonalité d'invitation à numéroté.
4. Continuer ce processus jusqu'à ce que vous entendiez qu'une tonalité d'invitation à numéroté et le microphone est fonctionnel. Une fois que vous avez localisé l'arrangement approprié, noter lui en cas qu'il est changé accidentellement ou vous employez votre IL95 à un téléphone différent.

Note: L'IL95 ne peut pas n'être employé à aucun téléphone où le clavier numérique est situé dans le combiné.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Si, après installation de votre amplificateur IL95, vous n'avez pas une tonalité d'invitation à numéroté ou la personne que vous avez appelée ne peut pas vous entendre, prendre les mesures suivantes :

1. Vérifier que tous les raccordements sont branchés correctement
2. S'assurer que la puissance est reliée
3. Déconnecter l'unité ou utiliser un autre téléphone et vérifier que votre service téléphonique travaille correctement
4. Changer le cadran d'arrangement de compatibilité situé sur le fond de l'unité

RENSEIGNEMENTS D'ENREGISTREMENT À LA FCC

Votre nouvel appareil a été enregistré auprès de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC). Cet appareil respecte les normes de la Section 68 de la réglementation FCC. La FCC exige que nous vous fournissions les informations suivantes :

Branchement et utilisation avec le réseau téléphonique national

La FCC exige que vous raccordiez votre appareil au réseau téléphonique national avec une prise téléphonique modulaire. Ce téléphone doit être branché sur une prise téléphonique modulaire USOC RJ-11C ou RJ-11W. Cet équipement ne doit pas être utilisé sur une ligne partagée ou sur une ligne de téléphone public

Avis à l'intention de la compagnie de téléphone

La FCC exige qu'à la demande de votre compagnie de téléphone locale, vous fournissiez les informations suivantes : a) La « ligne » à laquelle vous brancherez le téléphone (c'est-à-dire votre numéro de téléphone), et b) Le numéro d'enregistrement de l'appareil téléphonique et le numéro d'équivalence de sonnerie (REN). Ces numéros sont situés à l'arrière ou sous l'appareil téléphonique. Le REN est utilisé pour déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez brancher à votre ligne téléphonique, le dépassement du REN peut empêcher les appareils de sonner

lors de la réception d'un appel. Dans la plupart des zones, la somme de tous les REN doit être de 5 ou moins. Veuillez communiquer avec votre compagnie de téléphone locale pour en savoir plus à ce sujet.

Directives de réparations

Si l'on détecte un mauvais fonctionnement de votre appareil, la FCC exige qu'il ne soit pas utilisé et qu'il soit débranché de la prise modulaire jusqu'à ce que le problème soit corrigé. Les réparations du matériel téléphonique doivent absolument être effectuées par le fabricant ou l'un de ses représentants agréés, ou par des tiers autorisés par la FCC. Pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour les réparations, suivez les directives décrites dans la section « Garantie limitée ».

Droits de la compagnie de téléphone

Si votre appareil cause des problèmes au réseau téléphonique, la compagnie de téléphone peut interrompre temporairement votre service téléphonique. Dans la mesure du possible, elle vous avisera avant l'interruption de service. Si cet avis préalable s'avère impossible, elle vous donnera la chance de corriger le problème et elle vous informera de votre droit de porter plainte auprès de la FCC le plus tôt possible. La compagnie de téléphone peut modifier ses installations, son matériel, son fonctionnement ou ses procédés, ce qui peut avoir une incidence sur le fonctionnement de votre équipement. Vous serez avisés si de tels changements sont prévus.

Information sur les interférences : section 15 de la réglementation de la FCC

Certains appareils téléphoniques génèrent, utilisent et peuvent émettre des radiofréquences et, s'ils ne sont pas installés et utilisés correctement, peuvent causer de l'interférence à la réception radio ou télévisuelle. Cet appareil a été testé et jugé conforme aux normes imposées aux périphériques de classe B, en vertu de la section 15 de la réglementation FCC. Ces restrictions sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Toutefois, rien ne garantit que le brouillage ne se produira pas dans une installation donnée. Si votre appareil cause de l'interférence à la réception radio ou télévisuelle lorsqu'il est utilisé, vous pourrez corriger l'interférence avec l'une de ces mesures : a) s'il est possible de le faire de façon sécuritaire, réorientez l'antenne réceptrice de signaux radio ou télévisuel. b) Dans la mesure du possible, déplacez le téléviseur, la radio ou les autres récepteurs par rapport à l'équipement téléphonique. c) Si votre appareil téléphonique fonctionne avec le courant c.a., branchez-le dans une prise de courant c.a. qui se trouve sur un circuit différent de celui de la radio ou du téléviseur.

RAPPORT DU CANADA CS03 D'INDUSTRIE

Ce produit répond aux caractéristiques techniques du Canada d'industrie applicable. Ceci est confirmé par le numéro de matricule. L'abréviation, IC avant que le nombre

de registratin signifie que le registratin a été exécuté a basé sur une déclaration de la conformité indiquant que des caractéristiques techniques du Canada d'industrie ont été rencontrées. Elle implique cette industrie Canada a approuvé cet équipement. Avant d'installer cet équipement, les utilisateurs devraient s'assurer qu'il est permis d'être relié aux équipements de la compagnie de télécommunications locale. L'équipement doit également être installé suivre une méthode acceptable de raccordements. Le client devrait se rendre compte que la conformité dans les conditions ci-dessus puisse ne pas empêcher la dégradation du service dans quelques situations. À l'équipement certifié devraient être dépannés par un service canadien autorisé d'entretien indiqué par le fournisseur. Tous les réparations ou changements apportés par l'utilisateur de cet équipement, ou l'équipement fonctionne mal, peuvent donner à la compagnie de télécommunications la cause pour inviter l'utilisateur à déconnecter l'équipement.

Avertissement ! Les utilisateurs ne devraient pas essayer d'établir de tels rapports eux-mêmes, mais devraient entrer en contact avec l'autorité électrique appropriée d'inspection. Attention : Le nombre d'équivalence de sonnerie (REN) assigné à chaque terminal fournit une indication du nombre maximum des bornes permises d'être relié à une interface de téléphone. L'arrêt sur une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison de sujet de dispositifs seulement à la condition que la somme des nombres d'équivalence de sonnerie de tous les dispositifs ne dépasse pas 5. Une indication alternative du REN est le nombre de charge (LN) ;

ce nombre devrait être divisé par 20 pour rapprocher le REN équivalent. Le nombre de REN de cette unité est indiqué sur le fond de votre répondeur. Si vous maison a un équipement particulièrement de câble d'alarme relié à la ligne téléphonique, assurer que l'installation du TALK500 ne désactive pas votre équipement d'alarme. Si vous avez des questions au sujet de ce qui désactivera l'équipement d'alarme, consulter vos entreprises de téléphone ou un installateur qualifié. Cet appareillage numérique de la classe B est conforme à ICES-003 canadien.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Ce produit est garanti par ClearSounds contre toute défectuosité de matériel ou de main-d'oeuvre dans des conditions normales d'utilisation pour un (1) an à partir de la date d'achat. Si vous éprouvez un problème, communiquez avec notre service à la clientèle ou visitez notre site Web à l'adresse www.clearsounds.com.

Assurez-vous de conserver votre coupon de caisse comme preuve de la date d'achat au cas où vous auriez besoin de recourir au service de la garantie.

Pendant une période d'un an suivant la date d'achat, ClearSounds CommunicationsMC s'engage à réparer ou à remplacer (à sa discrétion) sans frais votre IL95, si l'on constate qu'il présente une défectuosité matérielle ou de main-d'oeuvre. Si nous choisissons de remplacer votre IL95, nous pourrons lui substituer un produit neuf ou remis à neuf de conception identique ou similaire. La réparation ou le remplacement sera garanti pour une période de 90 jours ou pour la durée résiduelle de la garantie (à partir de la date d'achat), selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue.

La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou la casse de l'une ou l'autre des pièces. Cela comprend les dommages liés au transport, le défaut de se conformer aux directives, l'utilisation abusive, les incendies, les inondations, l'utilisation d'accessoires incompatibles, les catastrophes naturelles ou la défaillance du service téléphonique de votre fournisseur. Le produit ne doit pas être modifié ni démonté par quiconque sauf par un représentant autorisé de ClearSounds CommunicationsMC . Le fait de modifier l'appareil sans autorisation entraînera l'annulation de toute garantie écrite ou implicite.

ClearSounds CommunicationsMC n'assume aucune responsabilité quant à la perte de temps, aux inconvénients, à la perte d'usage de votre IL95, aux dommages à la propriété causés par votre IL95 ni à tout dommage indirect ou consécutif.

Les frais d'expédition doivent être payés d'avance et l'emballage du produit doit être adapté au transport.

IMPORTANT : VOTRE COUPON DE CAISSE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT DONC ÊTRE CONSERVÉ ET PRÉSENTÉ LORS D'UNE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE.

**Service aux États-Unis
ClearSounds Communications**

Attention: Repair Center
1743 Quincy Avenue, Suite 155
Naperville, IL 60540
USA
800-965-9043

**Service au Canada
ClearSounds Canada**



ClearSounds®

Entendez les belles
choses de la vie

Consultez notre site Web à l'adresse www.Clearsounds.Com pour obtenir de plus amples renseignements et pour télécharger des manuels et des renseignements supplémentaires.